

Dans toutes les études, l'utilisation clinique d'Arthrosamid® est sûre et efficace<sup>1</sup>

| ÉTUDES CLINIQUES            | Nombre de participants | Nombre d'effets indésirables | Sensation de distension | Douleur du genou cible | Réduction de la mobilité | Œdème articulaire | Autre |
|-----------------------------|------------------------|------------------------------|-------------------------|------------------------|--------------------------|-------------------|-------|
| <b>DAISY</b>                |                        |                              |                         |                        |                          |                   |       |
| 104 semaines <sup>2,7</sup> | 91                     | 41                           | 15                      | 7                      | 4                        | -                 | 15    |
| <b>IDA</b>                  |                        |                              |                         |                        |                          |                   |       |
| 26 semaines <sup>1,2</sup>  | 49                     | 14                           | -                       | 7                      | -                        | 3                 | 4     |
| 52 semaines <sup>2,8</sup>  | 49                     | +2                           | -                       | + 0                    | -                        | + 0               | +0    |
| 104 semaines <sup>2,4</sup> | 35                     | +0                           | -                       | + 0                    | -                        | + 0               | +0    |
| 156 semaines <sup>9</sup>   | 35                     | +0                           | -                       | + 0                    | -                        | + 0               | +0    |
| <b>ROSA</b>                 |                        |                              |                         |                        |                          |                   |       |
| 52 semaines <sup>2,5</sup>  | 121                    | 41                           | -                       | 21                     | -                        | 13                | 7     |

Absence d'infection intra-articulaire ou de réaction allergique ont été rapportés dans une étude rétrospective<sup>7</sup>

Aucun patient n'a présenté d'effets indésirables graves lié à Arthrosamid®<sup>1</sup>

**Références** 1. Bliddal, H., et al. (2021) Polyacrylamide Hydrogel Injection for Knee Osteoarthritis: A 6 Months Prospective Study. *J. Orthop. Res.* 6(2). 1188. ISSN 2575-8241; 2. Data on file; 3. Arthrosamid®, Instructions For Use. Release Date March 2022 10082-003; 4. Bliddal, H., et al. (2022) A Prospective Study of Polyacrylamide Hydrogel Injection for Knee Osteoarthritis: Results From 2 Years After Treatment. Poster presented at OARSI 2022; 5. Bliddal, H., et al. (2022). One-year performance of polyacrylamide hydrogel vs. hyaluronic acid: A randomised controlled study. Poster presented at OARSI 2022; 6. Bliddal, H., et al. (2022). One-year performance of polyacrylamide hydrogel vs. hyaluronic acid in age, BMI, and Kellgren-Lawrence subgroups: A subgroup analysis of a randomised study. Poster presented at OARSI 2022. *Osteoarthritis and Cartilage* Vol.30, Supplement 1, S373-S374. DOI:10.1016/j.joca.2022.02.502; 7. Overgaard, A., et al. (2019) Safety of intra-articular polyacrylamide hydrogel for the treatment of knee osteoarthritis symptoms: A retrospective case series. *Clin Ortho Adv Res.* 6(2). 1188. ISSN 2575-8241; 8. Bliddal, H., et al. (2021) Polyacrylamide Hydrogel Injection for Knee Osteoarthritis: Results of a 52 Week Prospective Study. *Osteoarthritis and Cartilage*. Vol.29 S278; 9. Henriksen, M., et al. (2023). 3 Year Results From a Prospective Study of Polyacrylamide Hydrogel for Knee Osteoarthritis. *Osteoarthritis and Cartilage*, 31(5), P682-683. doi:10.1016/j.joca.2023.02.023.

Informations pour la commande:

[contact@cjtpharma.fr](mailto:contact@cjtpharma.fr)

Pour plus de détails sur les avertissements et les précautions à prendre, lisez l'IFU. Pour plus d'informations et pour consulter l'IFU, veuillez vous rendre sur le site suivant

[www.arthrosamid.com](http://www.arthrosamid.com)

## PRÉSENTATION ARTHROSAMID®

Une nouvelle classe de thérapie injectable pour traiter l'arthrose du genou  
Soulagement sûr et durable de la douleur en une seule injection<sup>1</sup>




Cliquez ici pour consulter nos NOUVELLES données sur 3 ans et les dernières mises à jour concernant l'arthrose du genou.



[www.cjtpharma.fr](http://www.cjtpharma.fr)  
[contact@cjtpharma.fr](mailto:contact@cjtpharma.fr)

ARTHROSAMID®  
by  
contura

# iPAAG

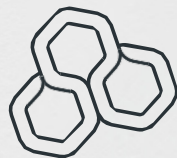

Arthrosamid® est un hydrogel de polyacrylamide injectable (iPAAG) pour administration intra-articulaire qui offre aux patients une alternative efficace aux thérapies actuelles.

Hydrogel injectable non biodégradable, Arthrosamid® procure un soulagement de la douleur à longue durée d'action, améliorant ainsi la qualité de vie des patients souffrant d'arthrose du genou.<sup>1</sup>



## BIOCOMPATIBLE

Perméable aux sels et aux molécules organiques, l'hydrogel est capable de s'intégrer aux tissus mous.<sup>2</sup>



## VISCOELASTIQUE

Les chaînes de polymères réticulés permettent un cisaillement souple.<sup>2</sup>



## NON-DEGRADABLE

La stabilité structurelle de l'hydrogel assure la longévité de l'action.<sup>2</sup>

## 6ml par séance de traitement<sup>3</sup>

Fourni sous forme de 6 seringues préremplies stériles de 1 ml à usage unique, destinées à être injectées par voie intra-articulaire dans l'articulation du genou à l'aide d'une seule aiguille 21G x 2 pouces (0,8 x 50 mm).

Images au microscope électronique d'un hydrogel de polyacrylamide cryocongelé et fracturé. Grossissement x6.000<sup>2</sup>



**ARTHROSAMID®**



## Simple

Il s'agit d'une procédure mini-invasive réalisée en ambulatoire sous anesthésie locale, avec guidage par ultrasons.<sup>3</sup>



## Sûr


L'Arthrosamid® est sûr pour l'utilisation prévue<sup>6</sup> et a fait l'objet de plus de 20 ans de recherche et de développement.<sup>2</sup>



## Durable

Dans les essais cliniques, les patients ont signalé une réduction de la douleur dès la 4<sup>e</sup> semaine. Cette réduction s'est maintenue pendant 3 ans.<sup>9</sup>


## Étude prospective de l'hydrogel de polyacrylamide (iPAAG) pour l'arthrose du genou Résultats à partir de 156 semaines après le traitement (IDA 3 ans)<sup>9</sup>

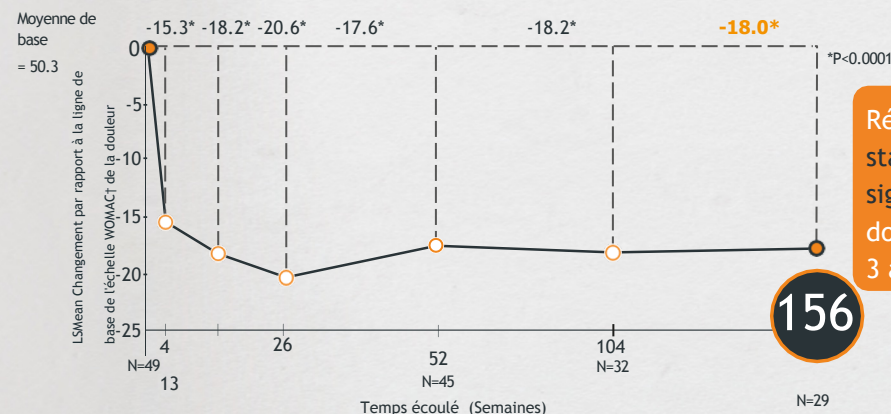

Réduction statistiquement significative de la douleur maintenue à 3 ans<sup>9</sup>

## Performance à un an de l'hydrogel de polyacrylamide (iPAAG) par rapport à l'acide hyaluronique

### Analyse de l'évolution par rapport aux valeurs de référence du sous-groupe < 70 ans (ROSA)<sup>2,6</sup>

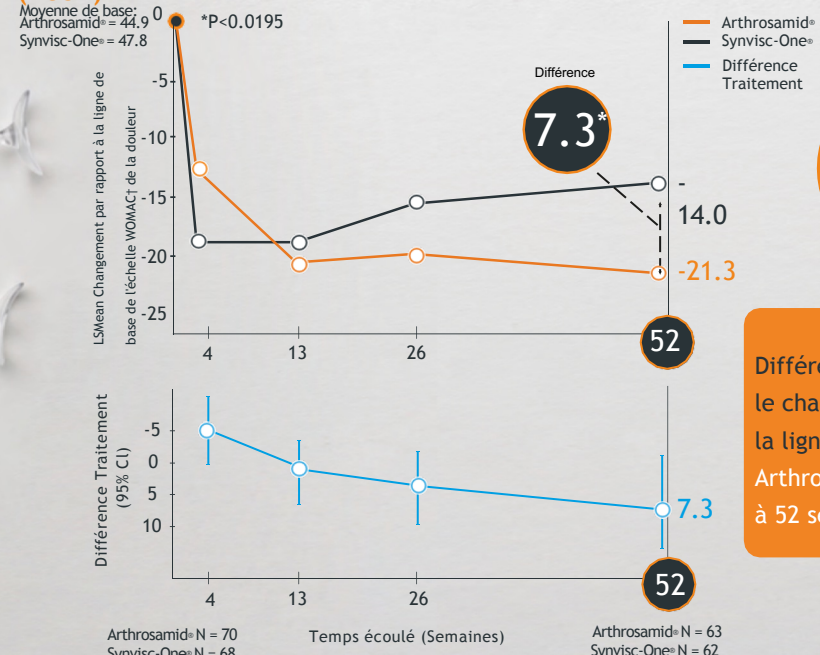

**79%**  
Taux de réponse<sup>2</sup>

Différence significative dans le changement par rapport à la ligne de base entre Arthrosamid® et Synvisc-One® à 52 semaines<sup>6</sup>

iPAAG: Injectable polyacrylamide hydrogel  
 1 WOMAC ou The Western Ontario and McMaster Universities Osteoarthritis Index est une mesure des symptômes et de l'incapacité physique LSMeans sont des moyennes modélisées/estimées. Les moyennes estimées utilisent les données des autres visites ainsi que les covariables.  
 Synvisc-One est une marque déposée de Sanofi-Aventis U.S. LLC. Arthrosamid est une marque déposée de Contura International A/S. copyright 2022 Contura International Ltd.