

Qu'est-ce que l'Arthrosamid®?

Arthrosamid® est un hydrogel injectable de dernière génération qui offre un soulagement durable et prouvé de la douleur liée à l'arthrose du genou^{1,2}, améliorant votre qualité de vie, sans chirurgie.^{1,3,4}

Arthrosamid® est administré par une procédure simple, en une seule étape, réalisée sous anesthésie locale par un médecin qualifié ayant l'habitude des injections articulaires⁵, vous permettant ainsi de rentrer chez vous le jour même.



Les prochaines étapes de votre parcours de traitement avec Arthrosamid®

Ce dépliant détaille tout ce que vous devez savoir sur la procédure du traitement, ainsi ce à quoi vous pouvez vous attendre, immédiatement après l'injection et sur le long terme.

Veuillez lire ce document dans son intégralité. Si vous avez des questions après votre traitement, n'hésitez pas à en parler à votre le médecin qui vous a administré Arthrosamid®.

À ce jour, des milliers de patients ont été traités avec Arthrosamid[®] dans plus de 200 cliniques à travers l'Europe.⁸

FAQs

Puis-je recevoir un nouveau traitement si l'effet du premier s'estompe et, si oui, après combien de temps ?

Bien que des essais n'aient pas été menés pour évaluer l'effet du traitement répété, les traitements futurs avec Arthrosamid[®] ne sont pas contre-indiqués et peuvent être discutés avec votre médecin.

Puis-je recevoir un traitement Arthrosamid[®] dans mes deux genoux ?

Oui, il est possible de traiter les deux genoux avec Arthrosamid[®], mais c'est à votre médecin de déterminer le délai le plus approprié entre les deux interventions.

Dois-je informer les professionnels de santé de mon traitement ?

Si vous devez subir une intervention chirurgicale ou dentaire importante à l'avenir, informez votre médecin que vous avez un implant injectable Arthrosamid[®] dans le genou, afin de garantir une évaluation médicale précise.

Pour toute question sur les indications, les résultats attendus, les contre-indications, les précautions, les mises en garde ou les éventuelles complications, n'hésitez pas à en parler avec votre médecin Arthrosamid[®]. En cas de complication, contactez-le immédiatement afin de recevoir un traitement approprié.

Pour plus d'informations contactez : [**contact@cjtpharma.fr**](mailto:contact@cjtpharma.fr)

References: **1.** Bliddal, H., et al. (2024) 3 year follow-up from a randomized controlled trial of intra-articular polyacrylamide hydrogel injection in subjects with knee osteoarthritis. *Osteoarthritis and Cartilage*. Vol 32 (6): 770-771; **2.** Bliddal, H., et al. (2025) A Prospective Study of Polyacrylamide Hydrogel Injection for Knee Osteoarthritis: Results From 5 Years After Treatment. Presented at WCO-IOF-ESCEO 2025; **3.** Christensen, L., et al. (2016). Histological Appearance of the Synovial Membrane after Treatment of Knee Osteoarthritis with Polyacrylamide Gel Injections: A Case Report. *Journal of Arthritis*. Vol (5): 217; **4.** Arthrosamid[®], Instructions For Use. Release Date March 2022. 10082-003; **5.** Overgaard, A., et al. (2019). Safety of intra-articular polyacrylamide hydrogel for the treatment of knee osteoarthritis symptoms: A retrospective case series. *Clin Ortho Adv Res. Osteoarthritis and Cartilage*. Vol 30(1): S370-71; **6.** Bliddal, H., et al. (2024). Polyacrylamide gel versus hyaluronic acid for the treatment of knee osteoarthritis: a randomised controlled study. *Clin Exp Rheumatol*. Vol 42(9):1729-1735; **7.** Bliddal, H., et al. (2021) Polyacrylamide Hydrogel Injection for Knee Osteoarthritis: A 6 Months Prospective Study. *J Orthop Res Ther*. Vol 6 (2). 1188. ISSN 2575-8241; **8.** Data on file; **9.** Bliddal, H., et al. (2024) Effectiveness and safety of polyacrylamide hydrogel injection for knee osteoarthritis: results from a 12-month follow up of an open-label study. *J Orthop Surg Res*. Vol 19: 274.

Comprendre votre traitement Arthrosamid®



Se déplacer librement, *Vivre Pleinement*

Un soulagement durable et prouvé de la douleur liée
à l'arthrose du genou sans avoir recours à la chirurgie.^{1,2}

ARTHROSAMID®

À quoi dois-je m'attendre durant l'intervention ?

Arthrosamid® est injecté en une seule fois dans la cavité intra-articulaire de votre genou, où il se répartit dans le liquide synovial et forme un réseau cohésif en adhérant à la membrane synoviale.⁶

Avant le traitement par Arthrosamid®, vous recevrez un anesthésique local pour insensibiliser la zone autour de votre genou. Un traitement antibiotique vous sera également administré au préalable afin de réduire tout risque potentiel d'infection.



Étape 1 : Votre genou sera nettoyé avant le traitement.

Étape 2 & 3 :

Arthrosamid® est ensuite singulièrement injecté dans la cavité synoviale de votre genou. Cette opération peut être réalisée à l'aide d'ultrasons.



Étape 4 : L'aiguille est ensuite retirée, et un pansement est posé sur le point d'injection.



À quoi dois-je m'attendre immédiatement après le traitement Arthrosamid® ?

- Après l'intervention, vous pouvez être autorisé à quitter la clinique immédiatement, ou vous pouvez vous reposer jusqu'à ce que vous vous sentiez prêt à partir.
- Votre genou peut commencer à être inconfortable lorsque l'anesthésie se dissipe, mais de nombreux patients ne signalent aucune gêne^{1,2,5}
- Cependant en cas d'inconfort, vous pourriez ressentir une douleur légère à modérée et/ou un léger gonflement au niveau du point d'injection⁵. Si votre genou devient rouge, chaud, très enflé ou plus douloureux, contactez immédiatement le médecin qui vous a administré Arthrosamid®.
- Vous devez poursuivre vos traitements habituels, y compris les antalgiques comme à l'ordinaire.
- Veuillez noter que l'administration d'Arthrosamid® peut procurer une sensation différente des autres traitements que vous avez déjà subis, car le produit est plus visqueux que les autres produits injectables.^{1,6}

Quels sont les effets secondaires ?

Les essais cliniques n'ont rapporté aucun effet indésirable grave suite au traitement par Arthrosamid®. Les effets secondaires les plus fréquents étaient des douleurs articulaires et une sensation de gonflement au niveau de l'articulation, généralement légers et transitoires, durant quelques jours à quelques semaines.⁷

Le profil de sécurité globale de l'hydrogel injectable a été établi au cours des vingt dernières années grâce à son utilisation pour diverses indications médicaux pour le corps.⁸


Dois-je suivre des séances de kinésithérapie pendant ma période de récupération après le traitement ?

Un programme de rééducation structuré favorisera votre récupération après le traitement par Arthrosamid®. Veuillez en discuter avec votre professionnel de santé. Des ressources gratuites pour vous accompagner dans votre rééducation sont également disponible sur le site internet Arthrosamid®.



**Le traitement par Arthrosamid®
reste sûr et efficace pour son usage prévu,
jusqu'à cinq ans après une seule injection.²**

Taux de réponse par âge

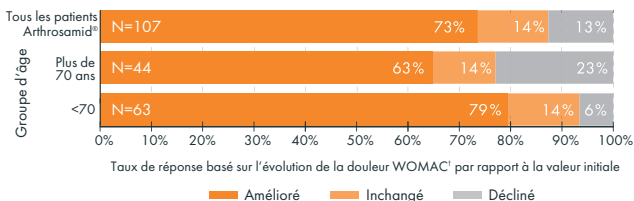

Parmi les patients de **moins de 70 ans**,
près de **80% ont rapporté une réponse
positive** au traitement par
Arthrosamid®.⁸

À quoi puis-je m'attendre à long terme après un traitement par Arthrosamid® ?

Soutenu par plus de vingt ans de recherche⁸, Arthrosamid® est un traitement sûr, efficace et adapté à toute personne souffrant d'arthrose du genou^{1,4,10,11} — avec une réduction significative et durable de la douleur, maintenue jusqu'à cinq ans après l'injection.^{1,2}

Quand vais-je commencer à ressentir un soulagement de la douleur ?

Vous pouvez ressentir un début de soulagement dans les 24 heures suivant l'injection. Cependant, il faut généralement entre 4 et 12 semaines pour en percevoir pleinement les effets. Les données cliniques montrent que la majorité des patients constatent une amélioration dans les premières semaines¹.

Quand puis-je reprendre mes activités habituelles ?

Comme pour toute procédure articulaire invasive, il est recommandé d'éviter les activités physiques intenses (par exemple : tennis, course à pied ou longues marches) durant les premières semaines suivant l'injection, et de commencer la rééducation dès que possible.

Il est important de garder à l'esprit qu'il n'existe pas de traitement curatif pour l'arthrose. Toutefois, un traitement réussi avec Arthrosamid® peut contribuer à réduire ou soulager la douleur au genou. Il est également possible que l'arthrose de votre genou ne s'améliore pas, et dans certains cas, qu'elle évolue défavorablement.