


Comment Arthrosamid® est-il administré ?

Avant le traitement par Arthrosamid®, une anesthésie locale est pratiquée pour insensibiliser la zone autour du genou. Des antibiotiques sont également administrés en amont afin de réduire tout risque potentiel d'infection.

Avant l'injection, le genou est soigneusement désinfecté. Arthrosamid® est ensuite injecté directement dans la cavité synoviale du genou, parfois sous contrôle échographique. L'aiguille est retirée, puis un pansement est posé sur le point d'injection.

Arthrosamid® se disperse dans le liquide synovial et commence à adhérer et à s'intégrer au tissu tapissant l'articulation du genou, le tissu synovial¹.

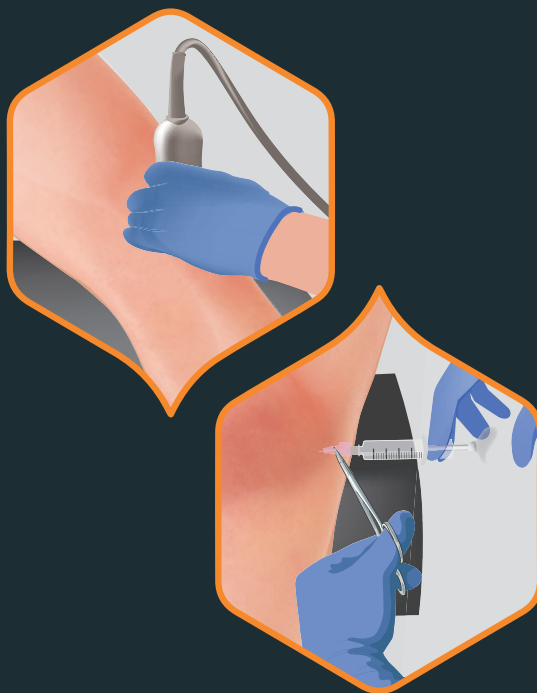


Comment fonctionne Arthrosamid® ?

Une fois intégré au tissu synovial de l'articulation du genou, Arthrosamid® commence à assouplir ce tissu et à en améliorer l'élasticité, entraînant une diminution cliniquement prouvée de la raideur articulaire et de la douleur, ainsi qu'une amélioration de la fonction du genou.^{2,3,4}

Environ 6 à 12 semaines après l'injection, l'implant Arthrosamid® est entièrement intégré au tissu synovial de l'articulation du genou.¹

C'est cette caractéristique unique qui permet une réduction significative de la douleur liée à l'arthrose sur une longue durée^{1,5} — en une seule injection.

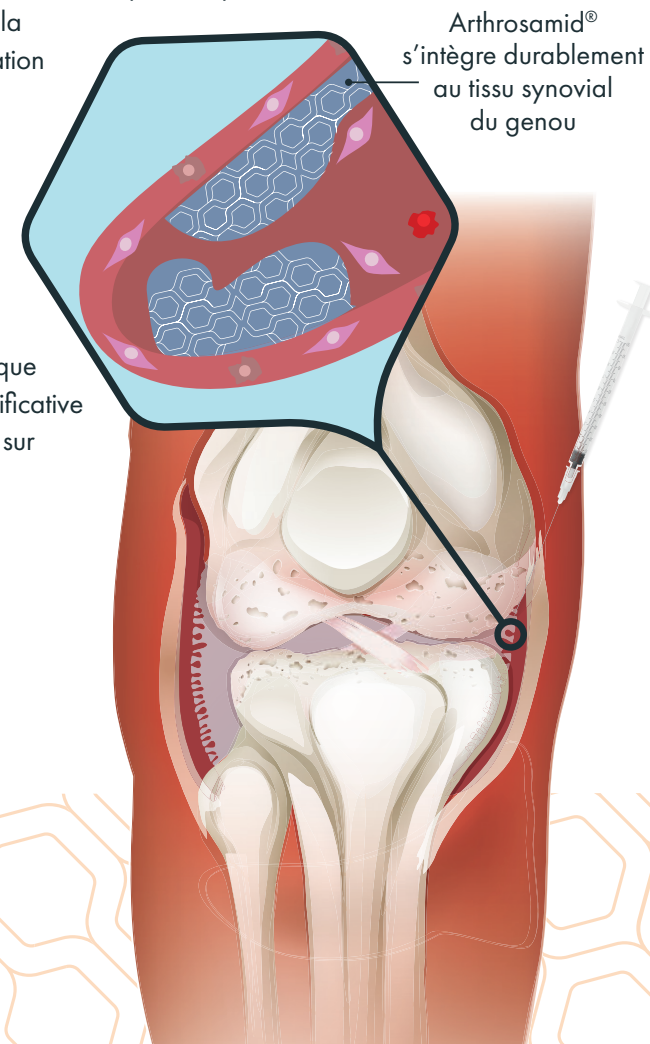

Références

1. Christensen, L., et al. (2016) Histological Appearance of the Synovial Membrane after Treatment of Knee Osteoarthritis with Polyacrylamide Gel Injections: A Case Report. Journal of Arthritis. Vol 5: 217;
2. Bliddal, H., et al. (2021) Polyacrylamide Hydrogel Injection for Knee Osteoarthritis: A 6 Months Prospective Study. J Orthop Res Ther. Vol 6 (2). 1188. ISSN 2575-8241;
3. Bliddal, H., et al. (2024) Polyacrylamide gel versus hyaluronic acid for the treatment of knee osteoarthritis: a randomised controlled study. Clin Exp Rheumatol. Vol 42(9):1729-1735 ;
4. Henriksen, M., et al. (2018). Intra-articular 2.5% polyacrylamide hydrogel for the treatment of knee osteoarthritis : an observational proof-of-concept cohort study. Clin Exp Rheumatol. Vol 36(6):1082-85. Epub 2018 Jul 18. PMID : 30148430 ;
5. Bliddal, H., et al. (2024) Polyacrylamide hydrogel for knee osteoarthritis: Four-year results from a prospective study. Orthop Procs. 2024;106-B(SUPP_18):106.

ARTHRO/FEB2025/PATIENT-MOA/FR

Réservé à l'usage des professionnels de santé.

Pour plus de détails sur les avertissements et les précautions à prendre, lisez l'IFU.
Pour plus d'informations et pour consulter l'IFU, veuillez visiter le site cjtpharma.fr
ou contactez-nous à l'adresse suivante : contact@cjtpharma.fr